



Телефонный аппарат с усилением звука

Инструкция по эксплуатации

Модель **ТА-537**



**ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И
СОХРАНИТЕ**

Вниманию потребителей!

Данная модель телефонного аппарата имеет значительное усиление звукового сигнала в телефонной трубке (до 50 dB).

Во избежание получения акустической травмы эту функцию категорически нельзя использовать людьми с потерей слуха без рекомендации врача сурдолога.

Ознакомлен:

Покупатель:

_____ (Ф. И. О.)
дата «___» _____ 201_

Перед первоначальным включением

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали именно этот телефонный аппарат с усилением звука под маркой «СЛУХ».

Для вашего сведения.

Серийный № _____ Дата покупки _____

Торговая организация и её адрес _____


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (входят в комплект поставки).

1. Телефонная трубка 2. Провод телефонной трубки 3. Телефонный шнур



4. Адаптер сети переменного тока

5. Подставка

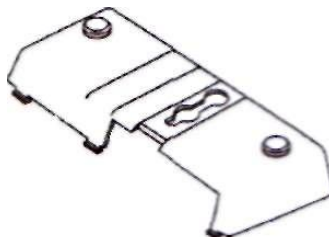

Содержание

Расположение органов управления.....	5
Основные функции.....	6
Установка и настройка.	
Установка батарей.....	7
Подключение телефонной трубки и телефонного шнура	8
Подключение к сети переменного тока.....	8
Выбор режима набора номера.....	8
Настенная установка аппарата.....	9
Основные операции.	
Звонок абоненту.....	10
Регулировка громкости телефонной трубки.....	10
Автоматическое усиление громкости.....	11
Звонок абоненту с использованием громкой связи.....	11
Использование головных телефонов.....	11
Повторный набор последнего набранного номера.....	11
Ответ на звонок.....	12
Режим удержания телефонной линии.....	12
Регулировка громкости и тона звонка.....	12
Расширенные функции.	
Запись телефонных номеров в телефон.....	13
Набор телефонных номеров клавишами быстрого набора номера.....	13
Удаление телефонных номеров из памяти телефона.....	13
Запись экстренных номеров в память.....	13
Набор экстренного номера.....	13
Перед тем как обратиться за помощью.....	14
Инструкция по технике безопасности.....	15-16
Гарантийное обслуживание.....	17
Сведения о сертификации.....	17

Расположение органов управления



Клавиши
Быстрого набора

Три клавиши экстренного
набора

Кнопка **ПАУЗА**

Кнопка **ПАМЯТЬ**

Кнопка **ПОВТОР**

Кнопка **СБРОС**

Кнопка **ЛИНИЯ**

Кнопка
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

Главный регулятор Громкости

Ступенчатый регулятор Громкости

Регулятор ТОНА

Световой индикатор звонка

Основные функции

- * 9 клавиш быстрого набора номера.
- * 3 клавиши экстренного вызова.
- * Усиленный вызывной сигнал до **90dB**, с регулировкой уровня громкости.
- * Регулировка тона вызывного сигнала.
- * Телефонная трубка адаптирована для использования со слуховым аппаратом.
- * Увеличение громкости в трубке до **50 dB** со ступенчатой и плавной регулировкой уровня сигнала.
- * Регулировка тональности сигнала в трубке.
- * Яркий световой индикатор вызова красного цвета.
- * Подсветка клавиш.
- * Двухсторонняя громкая связь.
- * Разъем для подключения наушников (3,5мм.).
- * Повтор последнего набранного номера.
- * Музыкальная пауза.
- * Набор номера в импульсном и тональном режимах.
- * Функция резервного питания.
- * Возможность настенной установки.

ВНИМАНИЕ!


При отключении питания телефонного аппарата от сети 220 В. сохраняются функции телефона.

Установка и настройка

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ.

Внимание! Телефонный аппарат сохраняет работоспособность без применения батарей.

Установка батарей позволит пользоваться усилением сигнала в трубке при отключении телефона от сети 220 вольт (функция резервного питания).

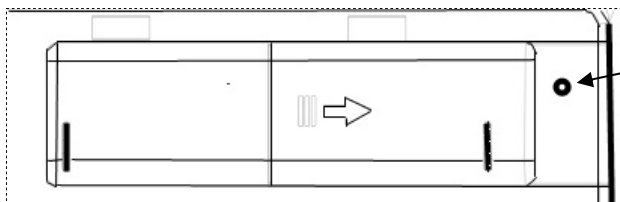

(рис.1)

Для установки батарей.

1. Открутите отверткой страховочный винт на нижней части корпуса телефона (рис.1).
2. Нажмите на крышку батарейного отсека и выдвиньте её по направлению стрелки.
3. Установите батареи, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку батарейного отсека и закрутите страховочный винт.

Используйте **4** высококачественные щелочные (алкалиновые) батареи типа “**LR6**” (**AA**) (в комплект не входят).

Срок службы батарей зависит от качества элементов, длительности разговора и уровня установленной громкости в трубке.

Во избежание неисправности, (попадания электролита внутрь корпуса телефона), своевременно заменяйте батареи.

Установка и настройка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ И ТЕЛЕФОННОГО ШНУРА.


1. Подключите телефонную трубку проводом телефонной трубки (стр.3) к аппарату.
2. Подключите телефонный шнур (стр.3) к аппарату, и к гнезду телефонной розетки..
3. После подключения снимите телефонную трубку и убедитесь в наличии гудка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

1. Подключите блок питания (стр.3) к телефонному аппарату и включите его в электрическую сеть 220В. Используйте только указанный тип адаптера питания **AC/DC ADAPTOR**
model:TL12500D-4 PRI. 220V-50Hz 65mA SEC.12V=500mA.
2. После подключения прозвучит короткий звуковой сигнал и кратковременно сработает подсветка клавиатуры.

ВЫБОР РЕЖИМА НАБОРА НОМЕРА.

Вы можете выбрать необходимый режим набора номера с помощью переключателя на задней панели телефонного аппарата (рис.2). Если вы подключены к АТС, работающей в **ТОНОВОМ** режиме установите переключатель в положение **«ТОН»**. В противном случае в положение **«ПУЛЬС»**.

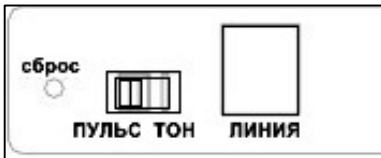


(рис.2)

Телефон поставляется с установкой режима **«ТОН»**.

Установка и настройка

НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА АППАРАТА.


Данный аппарат может быть установлен на стене.

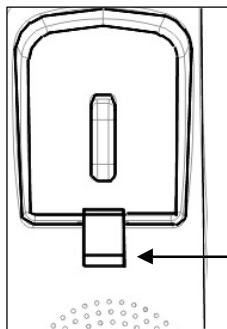

1.Нажмите на фиксатор телефонной трубки (рис.3) и выдвиньте его наверх, переверните фиксатор наоборот и вставьте его на место, теперь трубка надёжно крепится на держателе.

(рис.3)


2.Установите подставку (стр.3) на нижней части корпуса в пазы указанные стрелками (рис.4).

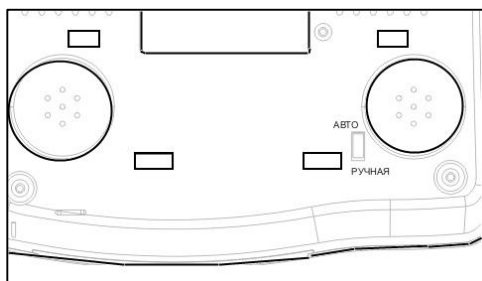

(рис.4)

3. Вверните шурупы в стену (2шт. расстояние между шурупами 85 мм). Установите телефонный аппарат, затем сдвиньте его вниз.


4. Для временной фиксации телефонной трубки в процессе разговора поместите её на аппарат, указанным на рисунке способом (рис.5).

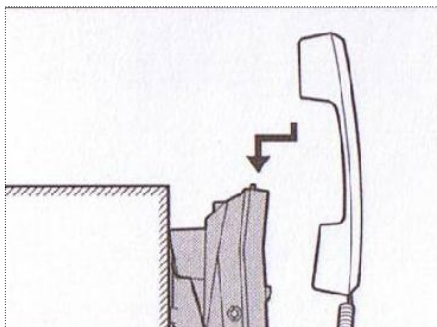

(рис.5)

Основные операции

ЗВОНОК АБОНЕНТУ.

1. Снимите трубку.
2. Наберите номер телефона:
 - если при наборе номера требуется пауза, нажмите в необходимых местах кнопку **ПАУЗА**.
 - для пользователей с импульсным набором номера, для быстрого перехода в тональный режим набора номера нажмите клавишу. 
3. По окончании разговора повесьте трубку.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ.

Данная модель телефонного аппарата имеет увеличенный уровень громкости, будьте внимательны при установке максимального уровня громкости в трубке, чтобы избежать акустической травмы.

Во время разговора, используя клавиши регулировки громкости и тона на передней панели (рис.7) вы можете установить комфортный уровень громкости в телефонной трубке.




(рис.7)

Кнопка **СТУПЕНЬЧАТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ** изменяет диапазон регулировки громкости

- в верхнем положении кнопки и крайнем правом положении плавного регулятора громкости достигается уровень звука 18 dB.
- при нажатой кнопки уровень громкости увеличивается до 50 dB, при этом загорается красный индикатор, на передней панели телефона показывая режим усиления.

ВНИМАНИЕ! перед нажатием кнопки уровня громкости переводите плавный регулятор громкости в крайнее левое положение для избежание резкого увеличения громкости. После чего плавно увеличивайте громкость.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ ГРОМКОСТИ.

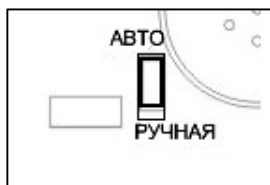

(рис.8)

При установке переключателя **АВТО РУЧНАЯ** на нижней панели телефона (рис.8) в положение **АВТО** при каждом поднятии трубки режим усиления будет включаться автоматически.

ЗВОНОК АБОНЕНТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРОМКОЙ СВЯЗИ.

1. Нажмите клавишу **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**, отрегулируйте громкость динамика регулятором, расположенным на боковой стенке телефона (рис.9)
2. Наберите номер телефона.
3. По окончании разговора повторно нажмите кнопку **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**



(рис.9)



(рис.10)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ РАЗГОВОРА.

1. Подключите наушники к гнезду **АУДИО**, расположенному на боковой стенке телефона (рис.10).
2. Нажмите клавишу **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**, отрегулируйте громкость в наушниках регулятором, расположенным на боковой стенке телефона начиная с минимального уровня.
2. Наберите номер телефона.
3. По окончании разговора повторно нажмите кнопку **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**.

ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА.

Для набора последнего набранного номера снимите трубку или нажмите кнопку **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ** и нажмите клавишу **ПОВТОР**.

Основные операции

ОТВЕТ НА ЗВОНОК.

При поступлении вызова раздается звонок, начинает мигать световой индикатор на передней панели и включается подсветка клавиш. Вы можете ответить на звонок, просто подняв телефонную трубку.

РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ.

Нажмите кнопку **ЛИНИЯ**

Если вы пользуетесь телефонной трубкой её можно положить на аппарат.


Во время удержания вызова звонящий будет слышать музыку.

Для снятия звонка с режима удержания поднимите трубку.

При наличии параллельного телефона, подключенного к этой же линии вы можете просто поднять его телефонную трубку.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ И ТОНА ЗВОНКА.

Данная модель телефонного аппарата имеет увеличенный уровень громкости звонка и яркий световой индикатор красного цвета. Это позволяет комфортно эксплуатировать аппарат людьми с ограниченными возможностями по слуху и зрению, а также использовать телефон в зашумленных помещениях.

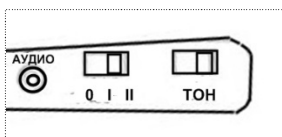

(рис.10)

Регулировка громкости звонка производится переключателем на боковой стенке корпуса телефонного аппарата. (рис. 10).


При положении переключателя в положении **0** звонок отключен, в положении **I** средняя громкость звонка, в положении **II** максимальная громкость звонка.

Для более комфортного восприятия звонка предусмотрена регулировка тональности звонка производится с помощью переключателя **ТОН**.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В ТЕЛЕФОН

Вы можете сохранить 9 телефонных номеров в память аппарата.

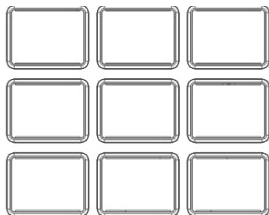

(рис.11)

1. Нажмите клавишу **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**.
2. Нажмите клавишу **ПАМЯТЬ**.
3. Нажмите одну из девяти клавиш **БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА** (рис.11).
4. Введите телефонный номер.
5. Нажмите клавишу **ПАМЯТЬ**,

НАБОР ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ КЛАВИШАМИ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА.

Поднимите трубку и нажмите нужную клавишу, произойдёт автоматический набор номера из памяти.

УДАЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА.

1. Нажмите клавишу **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**.
2. Нажмите клавишу **ПАМЯТЬ**.
3. Выберите ячейку памяти, в которой записан телефон (1-9)
4. Нажмите клавишу **#**
5. Нажмите клавишу **ПАМЯТЬ**, прозвучит звуковой сигнал.

ЗАПИСЬ ЭКСТРЕННЫХ НОМЕРОВ В ПАМЯТЬ



(рис.12)

1. Нажмите клавишу **ЗАПИСЬ**.
2. Нажмите одну из трех экстренных клавиш (рис.12) .
3. Введите телефонный номер.
5. Нажмите клавишу **ВВОД**, прозвучит звуковой сигнал.

НАБОР ЭКСТРЕННОГО НОМЕРА.

Поднимите трубку и нажмите нужную клавишу, произойдёт автоматический набор номера из памяти.

Перед тем как обратиться за помощью

Аппарат не работает.	Проверьте подключение аппарата к сети 220 в (стр.8)
Невозможно сделать исходящий звонок	Убедитесь в правильном выборе режима набора номера (стр.8)
Нет усиления сигнала в трубке без питания от сети 220в.	Проверьте батареи (стр.7).
Нет гудка в телефонной трубке	1.Проверьте подключение аппарата к телефонной розетке и подключение трубки к базовому блоку (стр.8). 2. Убедитесь в исправности телефонной розетки.
Не работает входящий звонок	Звонок выключен, регулятор уровня звонка (стр.14) находится в положении 0 . Установите переключатель в положение I или II .
Не работает усиление в трубке, усиление входящего звонка, подсветка клавиатуры и световая индикация звонка.	Проверьте подключение блока питания к сети 220 В. (стр.8)..
Абонент внезапно перестает Вас слышать в процессе разговора.	Возможно, в процессе разговора была нажата клавиша МИКР. (отключение микрофона) (стр.14).
Вы не можете запрограммировать некоторые режимы работы телефона	1.Программирование невозможно при поднятой трубке или включенным режимом громкой связи. 2.Не прерывайте программирование телефона в течение 15 секунд
Ранее запрограммированная информация удалена	Если телефон длительное время отключен от сети то запрограммированная информация может быть стерта

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЙТЕ ПРИВЕДЁННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

УСТАНОВКА АППАРАТА.

Условия окружающей среды.

Запрещается эксплуатировать аппарат вблизи источников воды, например, ванн, раковин, моек и т.д. Следует также избегать влажных помещений.

Аппарат следует размещать на удалении от источников тепла, например, радиаторов, кухонных плит и т.д. Не следует также размещать аппарат в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 40°C.

При перемещении телефонного аппарата из среды охлажденного воздуха в теплое помещение, перед включением необходимо выдержать его (не распаковывая) в этом помещении не менее 2-х часов во избежание выпадения влаги (конденсата) и, как следствие, возможного выхода телефонного аппарата из строя.

Расположение.

Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель аппарата. Не допускайте случаев падения на аппарат посторонних предметов или пролива жидкости.

Не подвергайте аппарат воздействию излишнего дыма, пыли, механических колебаний или ударов.

Устанавливайте аппарат на ровную поверхность.

Используйте только указанный тип адаптера питания.

**AC/DC ADAPTOR model:TL12500D-4 PRI. 220V-50Hz 65mA
SEC.12V=500mA.**

Используйте только исправную электрическую розетку.

ВНИМАНИЕ

Используйте только указанный тип батарей.

Не бросайте батареи в огонь. Они могут взорваться.

Не вскрывайте батареи. Утечка электролита может привести к травмированию глаз и кожи.

Не перезаряжайте батареи. Они могут взорваться или из них может вытечь электролит.

Меняйте все батареи одновременно.

При установке батарей точно определите полярность.

Внимайте батареи при длительном не использовании аппарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЕВ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ЛЮБОГО ВИДА ВЛАГИ.

При возникновении любой неисправности, отсоедините аппарат от электрической и телефонной линии и подсоедините заведомо исправный телефон. Если заведомо исправный телефонный аппарат работает надлежащим образом, не отсоединяйте аппарат от телефонной линии до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Если заведомо исправный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, обратитесь в Вашу телефонную компанию.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информацию о гарантийном ремонте Вы можете получить в едином справочном центре по телефонам

(499)272-40-39, (906)749-49-64

Срок гарантийного обслуживания составляет **12 месяцев** со дня передачи товара потребителю.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации	“Федеральное агентство связи”РФ
Декларация о соответствии	№ Д - Т 0708
Декларация выдана	22/08/2007
Декларация действительна до	22/08/2012

Срок эксплуатации изделия 5 лет со дня продажи.



**ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ
«СЛУХ» ПРИНАДЛЕЖАТ ООО «ЛЕММА ПЛЮС».**

ООО «ЛЕММА ПЛЮС» г.Москва

