



Усилитель сигнала
телефонного звонка со
стробоскопическим сигналом

Модель «СЛУХ» С-02



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики.

- Усиление телефонного звонка до **120 дВ**.
- Регулировка громкости звонка.
- **СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ** индикатор звонка
- Возможность отключения светового индикатора
- Питание от сети переменного тока 220 в.
- Функция резервного питания .
- Простое соединение с телефонной линией.
- Возможность настенной установки.

Подключение.

1. Подключите индикатор к телефонной линии и телефону (рис.1).



Рис. 1

2. Установите 3 элемента питания формата «АА» соблюдая полярность (рис.2).

3. Подключите разъем от блока питания к сигнализатору, затем блок питания в сеть переменного тока 220В. Выходные характеристики адаптера 6V/1000mA.

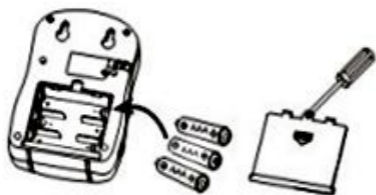



Рис. 2

4. Установите желаемый уровень громкости звонка. Регулировка громкости производится переключателем  на боковой панели.

5. Стробоскопический световой индикатор можно отключить. Отключение и включение индикации производится переключателем * на боковой панели

Функция резервного питания.

Устройство подключенное согласно п.2 и 3 полностью работоспособно.

При отключении адаптера питания от сети 220 в., работоспособность устройства обеспечивают 3 элемента питания «АА».

После выхода из строя элементов или их отсутствии, звуковой сигнал сохраняет свою работоспособность, при этом световой стробоскопический индикатор работать не будет.

ВНИМАНИЕ!

**НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО НА СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР,
ЭТО ВРЕДНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗРЕНИЯ.**

**Информацию о сервисных центрах вы можете
получить в едином справочном центре по телефонам:**

+7(499)272-40-39

+7(906)749-49-64